

# MESOEYE C71®



## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- preparat dostarczany jest w szklanej strzykawce o pojemności 1 ml z końcówką Luer Lock
- igła nie jest dołączona do opakowania
- instrukcja użycia
- dwie etykiety identyfikacyjne

## OPIS

Sterylny, biodegradowalny, niepirogenny, wiskoelastyczny, bezbarwny, przezroczysty żel. **Nie zawiera białek zwierzęcych.**

## SKŁAD

- peptyd PeriOrbital XP2 pobudza mikrokążenie krwi, zmniejsza przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych
- heksapeptyd-17 wykazuje silne działanie przeciwzapalne, poprawia krążenie, wzmacnia ściany naczyń krwionośnych i limfatycznych
- kompleks DRMC (kwas hialuronowy, witaminy, mikroelementy, aminokwasy i nukleotydy) modeluje, rewitalizuje i liftinguje skórę

## WSKAZANIA DO ZABIEGU

- Obrzęki pod oczami.
- Cienie pod oczami.
- Zmarszczki mimiczne pod oczami i w kącikach oczu.
- Malar bags powstające w wyniku przewlekłego zastoj u płynu w tkance podskórnej.
- Przygotowanie do plastyki powiek (ostatni zabieg należy wykonać miesiąc przed planowaną operacją).
- Regeneracja po plastyce powiek.
- Utrata jędrności i elastyczności skóry (widoczna wiotkość).

## PRZECIWWSKAZANIA DO ZABIEGU

- Stany zapalne skóry (aktywna opryszczka, otwarte zmiany trądzikowe) lub aktywne objawy chorób przewlekłych skóry w miejscu zamierzonej iniekcji.
- Nietolerancja na którykolwiek ze składników preparatu.
- Przebyte choroby autoimmunologiczne lub terapia immunosupresyjna.
- Implanty stałe w miejscu zamierzonej iniekcji.
- Cięża i karmienie piersią.
- Wiek poniżej 18 roku życia.
- Zaburzenia krzepnięcia.

## PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU

1. Wykonać demakijaż skóry.
2. Zdezynfekować obszar zabiegu.
3. (Opcjonalnie) Użyć krem do znieczulenia miejscowego.
4. Zalecana igła - 33G (0,20 x 4 mm).

## METODY INIEKCJI (technika mezoterapii igłowej)

Igłę należy wprowadzić na głębokość 1-3 mm.  
Zalecana ilość preparatu na depozyt - 0,05-0,1 ml.

### REDUKCJA CIENI I ZMARSZCZEK POD OCZAMI


Należy podać 0,05 ml preparatu na jeden depozyt metodą mezoterapii igłowej.

Igłę należy wprowadzić na głębokość 1-2 mm ze skosem skierowanym ku górze na całą powierzchnię wokół oka.

### REDUKCJA OBRZĘKÓW

Należy podać 0,1 ml preparatu na jeden depozyt bezpośrednio na obrzęknięty obszar, ściśnięty palcami w celu utworzenia fałdu.

Igłę należy wprowadzić na głębokość 2-4 mm.

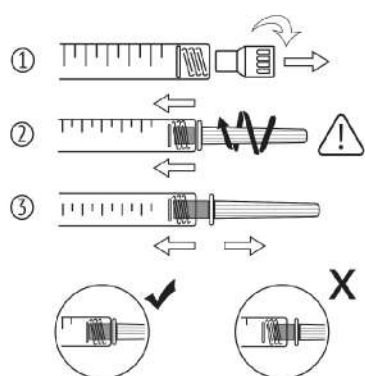

0,05 ml  
Rys. 1



0,1 ml  
Rys. 2

**UWAGA!** Preparat nie jest przeznaczony do iniekcji w inne miejsca niż skóra właściwa.

## PROTOKÓŁ ZABIEGOWY

SERIA	ODSTĘP
Podstawowa	3-6 zabiegów w odstępie 7-10 dni
Liczba zabiegów	Ustalana indywidualnie na podstawie nasilenia zmian skórnych.
Podtrzymująca	Według wskazań.

## ZALECENIA PRZED ZABIEGIEM

- Należy zebrać wywiad w celu ustalenia chorób, przyjmowanych leków oraz alergii.
- Należy unikać przyjmowania dużych dawek witaminy A i E, aspiryny oraz niesteroidowych leków przeciwzapalnych, ponieważ mogą nasilać krwawienie i zasinienie w miejscach iniekcji.
- Należy omówić szczegóły zabiegu iniekcyjnego, poinformować o typowych działaniach niepożądanych, które występują po zabiegach iniekcyjnych i ustępują po kilku dniach (obrzęk, zaczerwienienie) oraz zaproponować podpisanie formularza świadomej zgody.
- Wskazane jest prowadzenie dokumentacji fotograficznej, czyli wykonanie zdjęć na początku i końcu serii zabiegów.
- Należy uzyskać zgodę, omówić możliwości wykorzystania zdjęć oraz wprowadzić je do dokumentacji zabiegu.

## DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE I INTERAKCJE

- Iniekcja preparatu MesoEye C71® może spowodować zmianę koloru skóry, krótkotrwały rumień, obrzęk, świąd lub umiarkowaną bolesność i tkliwość w miejscu zabiegu utrzymujące się 1-3 dni.
- Nie wolno łączyć preparatu MesoEye C71® z innymi preparatami do iniekcji podczas jednego zabiegu w tej samej okolicy.

---

## ZALECENIA PO ZABIEGU

- Nie stosować kosmetyków do makijażu przez 24 godziny po zabiegu.
- Podczas trwania serii zabiegów nie należy korzystać z łaźni parowych, saun i solarium.
- Nie narażać miejsca iniekcji na wychłodzenie (mróz, wiatr).
- Aktywne ćwiczenia fizyczne nie są zalecane przez 48 godzin po zabiegu.

**OFICJALNY DYSTRYBUTOR MARKI  
NA TERENIE POLSKI**

**ODA MEDICAL SP. Z O.O.**  
ul. Toruńska 18C/C  
80-747 Gdańsk

+48 795 641 875

+48 606 979 670

