

# MESOSCULPT C71®



## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- preparat dostarczany jest w szklanej strzykawce o pojemności 1 ml z końcówką Luer Lock
- igła nie jest dołączona do opakowania
- instrukcja użycia
- dwie etykiety identyfikacyjne

---

## OPIS

Sterylny, biodegradowalny, niepirogenny, wiskoelastyczny, bezbarwny żel. **Nie zawiera białek zwierzęcych.**

---

## SKŁAD

- LipoBlock XP2® jest regulatorem adipogenezy, lipogenezy i lipolizy
- heksapeptyd-17 wykazuje silne działanie przeciwzapalne, poprawia krążenie, wzmacnia ściany naczyń krwionośnych i limfatycznych
- kompleks DRMC (kwas hialuronowy, witaminy, mikroelementy, aminokwasy i nukleotydy) modeluje, rewitalizuje i liftinguje skórę

---

## WSKAZANIA DO ZABIEGU

- Redukcja nadmiaru tkanki tłuszczowej w środkowej i dolnej części twarzy oraz w okolicy podbródka.
- Zaburzenia mikrokrążenia.
- Zaburzenia przepływu limfy.

## PRZECIWWSKAZANIA DO ZABIEGU

- Stany zapalne skóry (aktywna opryszczka, otwarte zmiany trądzikowe) lub aktywne objawy chorób przewlekłych skóry w miejscu zamierzonej iniekcji.
- Nietolerancja na którykolwiek ze składników preparatu.
- Przebyte choroby autoimmunologiczne lub terapia immunosupresyjna.
- Implanty stałe w miejscu zamierzonej iniekcji.
- Ciąża i karmienie piersią.
- Wiek poniżej 18 roku życia.
- Zaburzenia krzepnięcia.

## PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU

1. Wykonać demakijaż skóry.
2. Zdezynfekować obszar zabiegu.
3. (Opcjonalnie) Użyć krem do znieczulenia miejscowego.
4. Zalecana igła - 32G (0,23 x 6/13 mm).


### UWAGA!

Wybór długości igły (6 lub 13 mm) zależy od stopnia uwidocznienia tkanki tłuszczowej.

## METODY INIEKCJI

Iglę należy wprowadzić pod kątem 90° na głębokość 6-8 mm. Objętość preparatu powinna wynosić od 0,05 do 0,1 ml na jedno miejsce iniekcji.

W razie potrzeby objętość może zostać zwiększona do 0,15 ml.

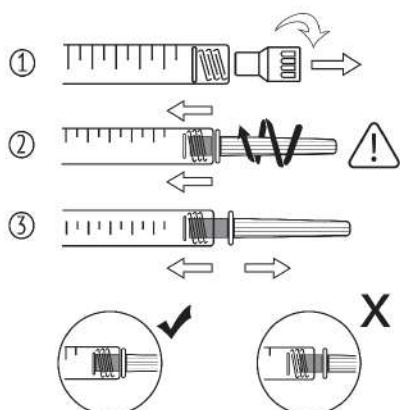

## PROCEDURA ZABIEGOWA

SERIA	ODSTĘPY
Podstawowa	4-8 zabiegów w odstępie 7-10 dni
Liczba zabiegów	Określona na podstawie nadmiaru tkanki tłuszczowej.
Seria podtrzymująca	Według wskazań.

### DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Iniekcja preparatu MesoSculpt C71® może spowodować zmianę koloru skóry, krótkotrwały rumień, obrzęk, świąd lub umiarkowaną bolesność i tkliwość w miejscu zabiegu utrzymujące się 1-3 dni.

### ZALECENIA PO ZABIEGU

- Nie stosować kosmetyków do makijażu przez 24 godziny po zabiegu.
- Podczas trwania serii zabiegów nie należy korzystać z łaźni parowych, saun i solarium.
- Nie narażać miejsca iniekcji na wychłodzenie (mróz, wiatr).
- Aktywne ćwiczenia fizyczne nie są zalecane przez 48 godzin po zabiegu.

**OFICJALNY DYSTRYBUTOR MARKI  
NA TERENIE POLSKI**

**ODA MEDICAL SP. Z O.O.**  
ul. Toruńska 18C/C  
80-747 Gdańsk

+48 795 641 875

+48 606 979 670

